




**Cochlear**<sup>®</sup>  
Hear now. And always

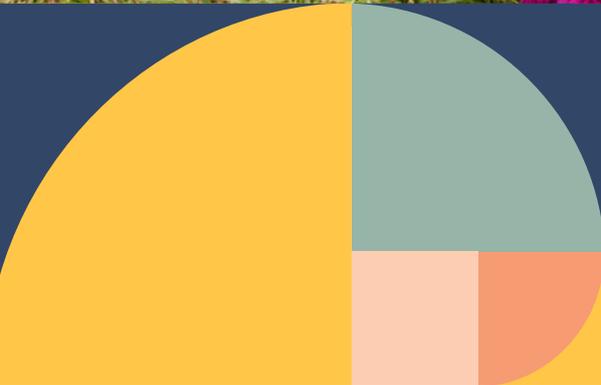

# Рекомендации Cochlear по организации обучения в школе



**Практические советы  
для родителей**

# Практические советы для родителей

Помогите вашему ребенку, использующему имплант Cochlear™ или звуковой процессор BaHa®, подготовиться к школе для успешного обучения.

Ваш ребенок идет в школу! В этот волнительный период у вас есть замечательная возможность подготовить ребенка к увлекательному и успешному учебному году. Следующие семь советов помогут вам подготовить ребенка к школе и уверенному началу учебы.

## 1 Изучите разные школы

- Начинайте изучать разные школы не менее чем за год до того, как ваш ребенок начнет обучение. Мы рекомендуем вам подготовиться к обсуждению роли школы и способов поддержки, которые она может предоставить вашему ребенку.

## 2 Настрой

- После того, как вы выберете подходящую школу, вы можете в рамках подготовки к первому учебному дню начать вводить связанные со школой слова, например, «игровая площадка», «собрание» и «учитель».
- Вы также можете завести фотокнигу «Подготовка к школе» и заполнять его фотографиями разных людей и объектов школы, а также рассказывать об их функциях, используя соответствующие слова и фразы.

## 3 FM-система и мини-микрофон

- Обсудите с местными специалистами и врачами возможность использования в классе вспомогательного слухового FM-устройства или беспроводного мини-микрофона Cochlear Wireless Mini Mic 2+. Данные устройства передают речь и звуковые сигналы прямо на звуковой процессор ребенка и помогают ему понимать речь в обычном классе и чувствовать себя уверенно. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному специалисту или в службу поддержки Cochlear.

## 4 Учитель в классе

- В начале года рекомендуются регулярные встречи с учителем ребенка для контроля его успехов и обсуждения возможных проблем.

- Убедитесь, что учитель вашего ребенка получает необходимую поддержку и обучение. Учитель может не знать, как создать в классе наилучшие условия обучения для вашего ребенка. Если после изучения данных ресурсов у учителя возникнут вопросы, вы можете обратиться за помощью к местным специалистам или в службу поддержки Cochlear.

## 5 Академическая подготовка

- Узнайте, какими базовыми языковыми и общими навыками должен владеть ребенок, поступающий в общеобразовательную школу.
- В начале учебного года сообщите учителю информацию о текущих навыках вашего ребенка. Для подготовки к беседе с учителем используйте чек-лист «Инструменты для школы» и данные рекомендации.

## 6 Распространяйте информацию в школе

- Вы можете рассмотреть возможность вступить в волонтерское движение или школьный родительский комитет, чтобы распространять среди учителей и учеников информацию о том, как каждый из них может помочь вашему ребенку успешно учиться в школе.

## 7 Внешкольные занятия

- Также необходимо подумать о социальной жизни вашего ребенка вне школы. Хобби, спортивные занятия и общение с друзьями — основные возможности для развития языковых навыков, уверенности в себе и навыков ненаправленного слухового восприятия.

# Советы для вашего ребенка

С помощью представленных ниже советов ваш ребенок сможет подготовиться к школе. Они способствуют формированию дружеских отношений с одноклассниками и учителями. Также они помогают установить правильные ожидания у ребенка относительно первого дня в школе.

## 1 Поднимай руку

- Не забывай поднимать руку, прежде чем что-нибудь сказать. Так учитель понимает, что ты слушаешь и готов учиться. Тебе нужно будет подождать своей очереди, так как в классе есть и другие ученики; учитель не будет тебя спрашивать каждый раз, когда ты поднимаешь руку.

## 2 Задавай вопросы

- Не стесняйся обратиться к учителю с вопросом, если ты не понял, что сказал учитель или другой ученик, или если ты хочешь узнать больше. Ты можешь поднять руку и сказать:
  - a.** Не могли бы вы повторить?
  - b.** Я не понял, что вы сказали. Не могли бы вы говорить медленнее?

## 3 Внимательно читай задание

- (если ваш ребенок умеет читать) - Если ты не понимаешь, что тебя просит сделать учитель, подними руку и скажи:
  - a.** Я не понимаю, что нужно сделать.
  - b.** Я все правильно делаю?

## 4 Проверь, что ты слышишь

- Перед занятием проверь, что звуковой процессор, FM-система или мини-микрофон Mini Mic 2+ функционирует. Если ты плохо слышишь, скажи об этом учителю, и он тебе поможет.

## 5 Заводи друзей

- Дружить здорово! Чтобы завести друзей, будь вежливым, добрым и отзывчивым. Друг поможет тебе, если ты что-то не расслышишь или у тебя появятся вопросы.

## 6 Наберись терпения

- Если кто-то из учеников не понимает, что ты говоришь, повтори. Чтобы одноклассники тебя понимали, ты можешь:
  - a.** Повторить сказанное.
  - b.** Говорить четко и медленно.
  - c.** Объяснить по-другому.

## 7 Рассказывай, как работает устройство

- Если тебе зададут вопрос о кохлеарном импланте, расскажи, как он работает и помогает тебе. Ты можешь сказать следующее:
  - a.** Имплант помогает мне слышать.
  - b.** В него встроены микрофоны, которые улавливают звук. Лучше всего я слышу, когда говорящий смотрит на меня.

**Для получения дополнительной информации обратитесь к местному специалисту или в службу поддержки.**

# Cochlear Family

## Hear now. And always

Компания Cochlear ставит своей целью помогать людям с частичной или полной потерей слуха слышать мир вокруг. Являясь мировым лидером в производстве имплантируемых слуховых устройств, мы выпустили более 700 000 устройств, чтобы люди всех возрастов могли слышать и реализовывать свои способности в различных сферах.

Мы стремимся обеспечить нашим пользователям наилучшее использование слуховых устройств в течение всей жизни и делаем инновационные технологии следующего поколения доступными. Мы сотрудничаем с ведущими клинично-исследовательскими организациями и центрами поддержки, чтобы вносить вклад в развитие науки о терапии нарушений слуха и предоставлять услуги высокого качества.

Именно поэтому из всех производителей имплантов люди наиболее часто выбирают компанию Cochlear.

[www.cochlear.com/ru](http://www.cochlear.com/ru)



Если вы кандидат или пользователь, для получения сведений о лечении потери слуха обратитесь к своему лечащему врачу. Результаты могут быть различными. Лечащий врач расскажет подробнее о том, какие факторы могут повлиять на результаты. Всегда соблюдайте указания по использованию. Некоторые продукты доступны не во всех странах. Для получения сведений о продукции обратитесь к региональному представителю компании Cochlear. Дополнительная информация, предупреждения и меры предосторожности содержатся в инструкции по применению.

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントウア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, True Wireless, логотип в форме эллипса, Vistafix, Whisper, WindShield и Xidium являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками группы компаний Cochlear Group. Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, Osia, логотип в форме эллипса, а также словесные обозначения, помеченные символом ® или ™, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками группы компаний Cochlear (если не указано иное).