


Übersicht

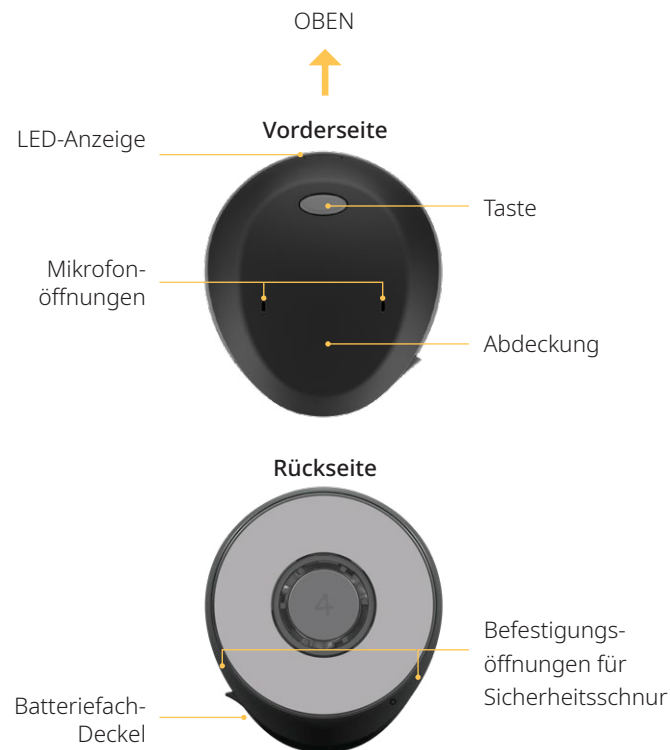

AU Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
1 University Avenue, Macquarie University,
NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP DE Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG
Mailänder Straße 4 a, 30539 Hannover,
Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

CH REP CH Cochlear AG
Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204 Fax: +41 61 205 8205

US Cochlear Americas
10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO
80124, USA
Tel: +1 303 790 9010

www.cochlear.com

GB UK Responsible Person: Cochlear Europe Ltd

6 Dashwood Lang Road, Bourne Business
Park, Addlestone,
Surrey KT15 2HJ, United Kingdom
Tel: +44 1932 26 3400
Fax: +44 1932 26 3426

TR Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Küçükbakkalköy Mah, Defne Sok, Büyükhanlı
Plaza No:3 Kat:3 Daire: 9-10-11-12, 34750,
Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 538 5900
Fax: +90 216 538 5919

Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, Osia, SmartSound, das
elliptische Logo sowie Zeichen mit den Symbolen ® oder ™ sind Marken bzw. eingetragene
Marken der Cochlear Unternehmensgruppe (wenn nicht anders vermerkt).

© Cochlear Limited 2023. Alle Rechte vorbehalten.

P1607819 D1607820-V3 German translation of D1404321-V8 2023-06

CE
0123



D1607820-V3

DE Deutsch



Cochlear™ Osia® 2 Soundprozessor Kurzanleitung

Ein- und Ausschalten



Batterie wechseln



Programm wechseln



Verriegelung




Wireless-Zubehör synchronisieren



Audioübertragung von Wireless-Zubehör



Flugmodus

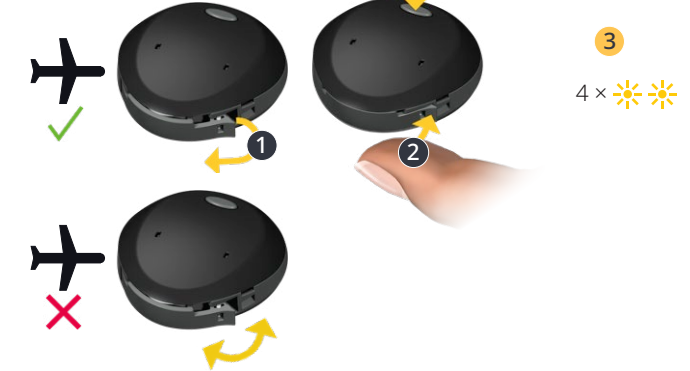

Abdeckung abnehmen



Abdeckung anbringen

