

Простая беседа

Развитие слухового

восприятия Звуки, слова и фразы

Звуки для развития слухового восприятия — это звуки, связанные со знакомыми ребенку предметами из повседневной жизни.

Звуки для развития слухового восприятия — игрушки и предметы

Звук	Игрушка	Звук	Игрушка
ууу(р)	самолет	чух-чух-чух	поезд
бах бах	пузыри, хлопанье	би-биии	автобус
би-бип/врум-врум	машина	брр	грузовик
плюх-плюх	лодка	тик-так	часы
ой/ай	упасть, пораниться	виу-виу	скорая помощь
и-и	обезьяна	ха-ха-ха	клоун/смех
марш!	бег	хо-хо-хо	Санта-Клаус
я-ху!	ковбой	вжух	катиться
уа-уа-уа	малыш	привет!	зеркало
мяу	кошка	гав-гав, тяф-тяф	собака
му	корова	и-го-го	лошадь
бе	овца	хрю	свинья
кря	утка	ух-ух	сова
прыг-скок	кролик/лягушка	чирик, чик-чирик	птица
кукареку	петух	кар-кар	ворона
вжик-вжик	мельница/юла/колеса	mmm	пицца
тяп-тяп-тяп	игрушечная лопатка	с	змея
ш	игра в сон	rrr	медведь
баю-бай	укачивание малыша	вверх вверх вверх	игра с подъемом вверх

По материалам: Estabrooks, W. (1998) cochlear Implants for Kids, © 1998 Warren Estabrooks and The Alexander Graham Bell Association of the Deaf. Inc. Опубликовано с разрешения.

Не забывайте...

- Говорить ближе к микрофону и использовать протяжный голос.
- Произносите звуки для развития слухового восприятия вместе с названием игрушки, например, автобус едет би-биии; вентилятор крутится вжик-вжик.
- Сначала произнесите звук и дайте ребенку время, чтобы его услышать, затем произнесите звук или фразу несколько раз и только потом покажите игрушку или предмет.
- Когда ребенок заметит игрушку, повторяйте звуки в течение всего времени, пока он с ней играет.
- Делайте паузы, предоставляя ребенку возможность повторить звук. Чтобы стимулировать ребенка использовать голос, можно вовлечь в разговор другого взрослого или старшего ребенка. Вы только произносите звук и двигаете игрушку, разговаривает второй взрослый или старший ребенок. Попробуйте этот метод вместе с вашим ребенком.
- На первых этапах используйте звуки, которые сильно различаются, например, звук коровы «муу-муу» имеет большую длительность, чем звук утки «кря-кря». Со временем после многих повторений ребенок начнет связывать соответствующий звук с игрушкой.
- Беседуйте и играйте с ребенком, используя звуки для обучения слуховому восприятию. Используйте каждую возможность, чтобы потренировать эти звуки с вашим ребенком. Для эффективного развития слуховых и языковых навыков используйте рисунки, книги, игрушки, животных и реальные предметы.

Изучение связей между звуками и предметами является увлекательным занятием для вашего ребенка, эффективность которого будет выше, если ребенок будет практиковаться ежедневно. В своей речи при выполнении рутинных действий и во время игр используйте простые слова и фразы для обучения

слуховому восприятию, например, чисти, чисти, чисти зубы; вверх вверх вверх идем; открой дверь, открой ее; вылей, вылей, вылей это; сними; пока-пока, скажи «пока» бабушке. Умение определять, понимать и использовать простые повседневные фразы — важная ступень в развитии языковых навыков.

Звуки для развития слухового восприятия — занятия и ситуации

Звук	Занятие/ситуация	Звук	Занятие/ситуация
бах бах	пузыри, мытье посуды	ай/ой	ребенок упал/его
ха-ха-ха	люди смеются	беее, фу	толкнули
марш!	бег	хо-хо-хо	что-то грязное
вжух	катиться	уа-уа-уа	Санта-Клаус
привет!	приветствие	пока-пока	малыш
хоп!	поджаренный тост	вжик-вжик	прощание
mmm	еда, прием пищи	тяп-тяп-тяп	размешивание
просыпайся!	пробуждение семьи	ш	пищи/напитка
шшшш	обжарка/горячая пища	баю-бай	игры в саду
вверх вверх вверх	лестница/поднять двери/	жмiiii	укладываться спать
открой	чипсы	тяниии	укачивание малыша
толкай, толкай	что-то тяжелое	ой-ей	зубная паста/салфетка
(шепотом)	посмотри	УХ ТЫ!	банановая
уууууууууу подними	что-то уронил	мой мой мой	кожура/молния
подними			несчастный случай
			мне нравится
			мытьё рук

Пример занятия: стирка одежды

Подойдите к корзине для грязного белья:

Бееее. Посмотри, какая грязная одежда.

Нужно ее постирать, постирать, постирать.....Бееее, грязная одежда.

Помоги мне ее вытащить... Тяяяяяяя

Рядом со стиральной машиной:

Тебе нужно ОТКРЫТЬ дверь и ТОЛКАТЬ, ТОЛКАТЬ, ТОЛКАТЬ одежду в машину.

Принеси порошок, чтобы мы могли ПОСТИРАТЬ, ПОСТИРАТЬ, ПОСТИРАТЬ.

ОТКРОЙ ящик

С порошком:

НАСЫПЬ порошок

ТОЛКАЙ, ТОЛКАЙ, ТОЛКАЙ — закрыл

Давай ВКЛЮЧИМ машину. НАЖМИ, НАЖМИ, НАЖМИ кнопку.

Слушай.....Я слышу ПШШШШ, плещется вода

ПШШШ — слушай.

С другими идеями можно ознакомиться здесь: Слушай, учись и говори

■ Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden T: +46 31 792 44 00

■ Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland T: +41 61 205 8204 F: +41 61 205 8205

■ Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Mailänder Straße 4 a, 30539 Hannover, Germany T: +49 511 542 7750 F: +49 511 542 7770

Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom T: +44 1932 26 3400 F: +44 1932 26 3426

Cochlear Austria GmbH CEE Office, Millennium Tower, 45th Floor, Handelskai 94-96, 1200 Vienna, Austria T: +43 1 37600 26 000

Cochlear Europe Limited Czech Branch Office, Prime Office Building, Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4, Czech Republic T: +420 222 13 53 13

www.cochlear.com/ru



Если вы кандидат или пользователь, для получения сведений о лечении потери слуха обратитесь к своему лечащему врачу. Результаты могут быть различными. Лечащий врач расскажет подробнее о том, какие факторы могут повлиять на результаты. Всегда соблюдайте указания по использованию.

Некоторые продукты доступны не во всех странах. Для получения сведений о продукции обратитесь к региональному представителю компании Cochlear.

© Cochlear Limited 2025. Cochlear, Hear now. And always, Nucleus и логотип в форме эллипса являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками группы компаний Cochlear.

D2340659-V1 2025-05 Russian Translation of D2083235 V1 2023-04