

# Cochlear™ (コクレア®) ペア設定ガイド (Android™ 用)



本書では、Cochlear™ (コクレア®) Nucleus® 8、Nucleus 7、または Kanso® 2 サウンドプロセッサ\* を対応する Android スマートフォン† の Nucleus Smart アプリとペア設定して、サウンドプロセッサを操作およびモニタできるようにする方法について説明します。

## 📄 アドバイス

- Android 版のアプリを使用するには、サウンドプロセッサに最新のファームウェアがインストールされている必要があります。医療従事者にご確認ください。
- 一部の画面には、お名前とサウンドプロセッサのモデルが表示されます。このガイドに示されている画像は画面の例であり、アプリに表示されるものとは異なる場合があります。本書に書かれた手順とともにアプリ自体の対応する画面を見て、アプリの操作の参考にしてください。

\* 国によっては販売されていない製品があります。

† 適合性情報については、[www.cochlear.com/compatibility](http://www.cochlear.com/compatibility) をご覧ください

## サウンドプロセッサとのペア設定




### 📄 アドバイス

- すでに他のサウンドプロセッサをペア設定している場合は、まずそのペア設定を解除する必要があります。ペア設定を解除する手順については、4 ページを参照してください。
- 無線干渉: サウンドプロセッサをアプリとペア設定または接続しようとしたときに、電子レンジ、ワイヤレスルーター、テレビストリーマーなどの機器から干渉を受ける場合があります。これが起こった場合は、干渉源の機器から離れた場所でもう一度試してください。

- 1 サウンドプロセッサを準備します。
  - 2 Android スマートフォンで Bluetooth をオンにします。
  - 3 Nucleus Smart アプリを起動します。
  - 4 「ようこそ (Welcome)」画面をスワイプします。
  - 5 コクレアアカウントを作成します。
- 6 「サウンドプロセッサのペア設定 (Pair your processor(s))」画面が表示されます。「続行 (Continue)」をタップします。
  - 7 「位置情報 (Location)」ポップアップで、「OK」をタップします。
  - 8 「Nucleus Smart を許可 (Allow Nucleus Smart)」ポップアップで、「許可 (ALLOW)」をタップします。

または

すでにアカウントをお持ちの場合はログインします。

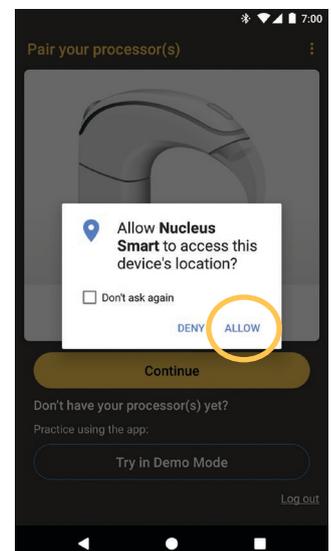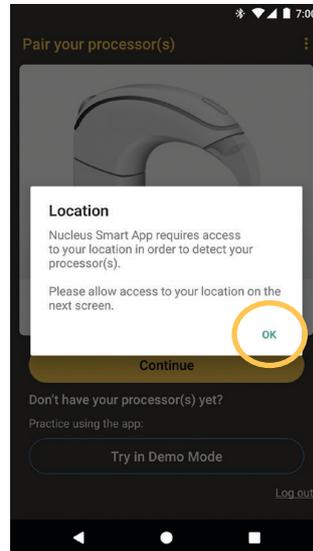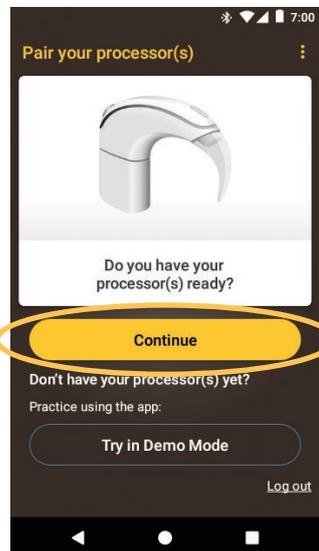

... 次のページに続く ...


- 9 「サウンドプロセッサの検出 (Detect your processor(s))」画面が表示されます。

サウンドプロセッサの電源をいったん切ってから、再度入れます。両側にサウンドプロセッサを装着している場合は、2台とも順番に行ってください。


サウンドプロセッサの電源を切って入れ直したら、「続行 (Continue)」をタップします。




- 10 お使いのサウンドプロセッサが表示されたら、1回タップしてペア設定を開始します。

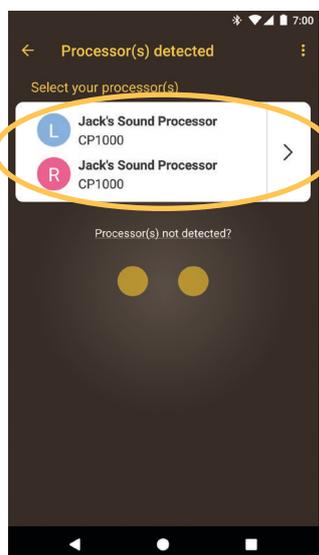


- 11 ペア設定が完了すると、「ペアリングされたサウンドプロセッサ (Paired processors)」画面が表示されます。「続行 (Continue)」をタップします。

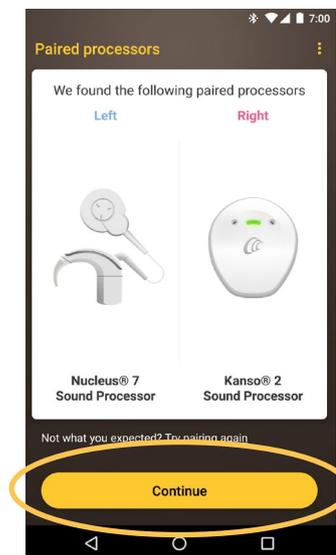

- 12 画面の指示に従って、サウンドプロセッサを「確認 (Verify)」します。「プロセッサの準備 (Preparing your Processor(s))」画面が最長 60 秒間表示されます。「続行 (Continue)」をタップします。

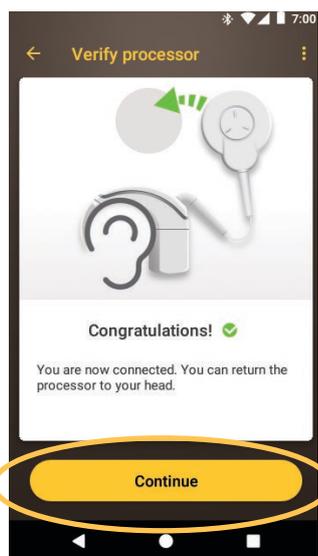



- 13 「サウンドプロセッサ (Sound Processor(s))」画面でオプションをタップします。メッセージが表示されたら、ユーザーの詳細を入力します。

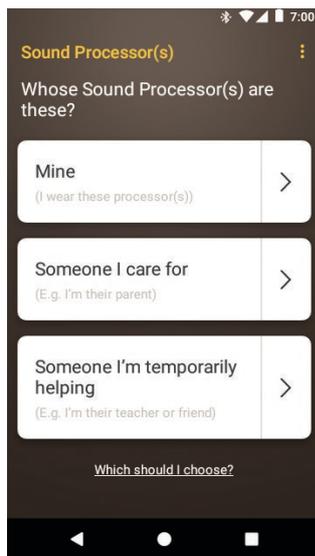

- 14 「音声のストリーミング (Audio streaming)」画面が表示された場合は、次のページのステップを参照してください。

あるいは

「セットアップが完了しました (Setup complete)」画面が表示されたら、「アプリの使用を開始 (Start using the app)」をタップします。

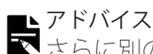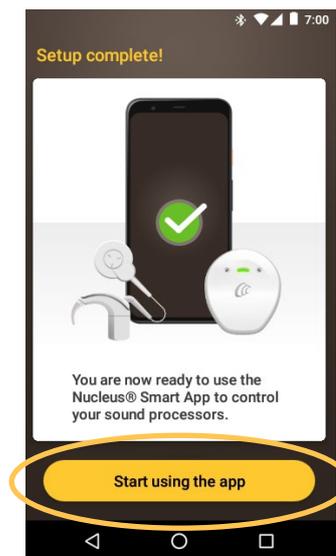

アドバイス

さらに別の対応端末とペア設定するには、まずすでにペア設定されている端末の Bluetooth をオフにする必要があります。


# 補聴器用の音声ストリーミングに対応したスマートフォン

ご使用のスマートフォンが補聴器用の音声ストリーミングに対応している場合は、スマートフォンからの音声をサウンドプロセッサで直接受信できます。音声ストリーミングを設定するには、以下のことを行います。


- 1 「音声ストリーミング (Audio streaming)」画面が表示されたら、「有効 (Enable)」をタップします。少しの間、サウンドプロセッサの電源が切れます。
- 2 他のサウンドプロセッサがすでにペア設定されている、またはスマートフォンにストリーミングしている場合は、該当するサウンドプロセッサをここで「クリア (Forget)」する必要があります。
- 3 「サウンドプロセッサに接続中 (Connecting to processor)」画面が表示されている間、待ちます。



画面の指示に従ってサウンドプロセッサを「クリア (Forget)」し、「戻る (back)」ボタンをタップして Nucleus Smart アプリに戻ります。

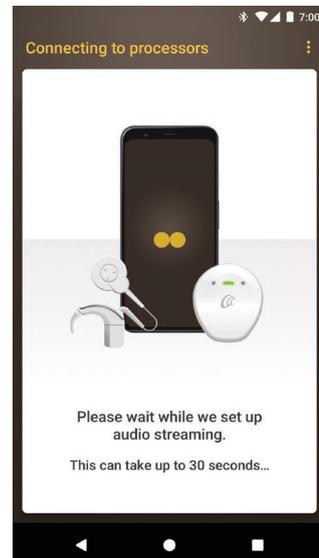

- 4 スマートフォンのシステム音をオフにしている場合は、「システム音 (System sounds)」画面が表示されます。画面の指示に従ってシステム音をオフにし、「戻る (back)」ボタンをタップして Nucleus Smart アプリに戻ります。
- 5 「セットアップが完了しました (Setup complete!)」画面が表示されたら、「アプリの使用を開始 (Start using the app)」をタップします。
- 6 Nucleus Smart アプリを使用できます。詳しくは、『Nucleus Smart アプリ取扱説明書』を参照してください。

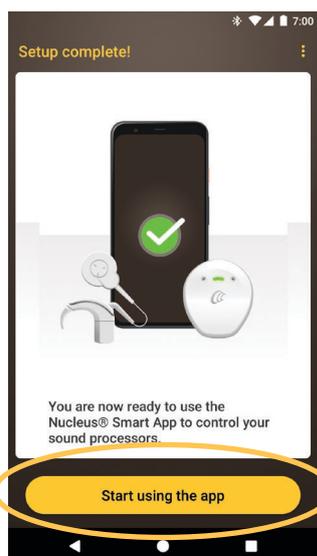

**アドバイス** さらに別の対応端末とペア設定するには、まずすでにペア設定されている端末の Bluetooth をオフにする必要があります。


# サウンドプロセッサとのペア設定の解除

新しいサウンドプロセッサを受け取った場合など、今までとは異なるサウンドプロセッサを使用する場合は、以下のことを行う必要があります。


- ・古いサウンドプロセッサとの「ペア設定を解除 (Unpair)」します。
- ・新しいサウンドプロセッサと「ペア設定 (Pair)」します。

サウンドプロセッサとのペア設定を解除するには、以下のことを行います。

- 1 アプリのメニューを開きます。
- 2 「設定 (Settings)」をタップします。
- 3 「サウンドプロセッサ設定 (Processor settings)」をタップします。
- 4 「サウンドプロセッサとのペア設定の解除 (Unpair your processor(s))」をタップします。

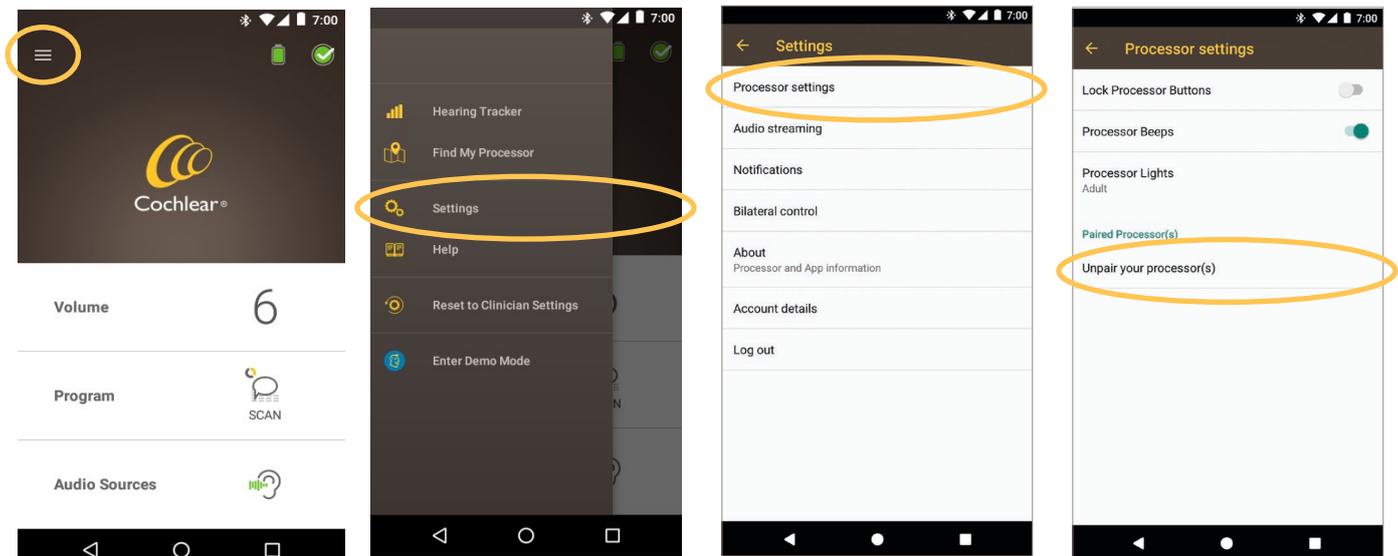




- 5 「はい (YES)」をタップします。
- 6 サウンドプロセッサのストリーミングが有効になっていると、ストリーミングを無効にする方法が表示されます。
  - A 「はい (YES)」をタップし、画面の指示に従って、サウンドプロセッサを「クリア (Forget)」します。
  - B 「戻る (back)」ボタンをタップして、Nucleus Smart アプリに戻ります。

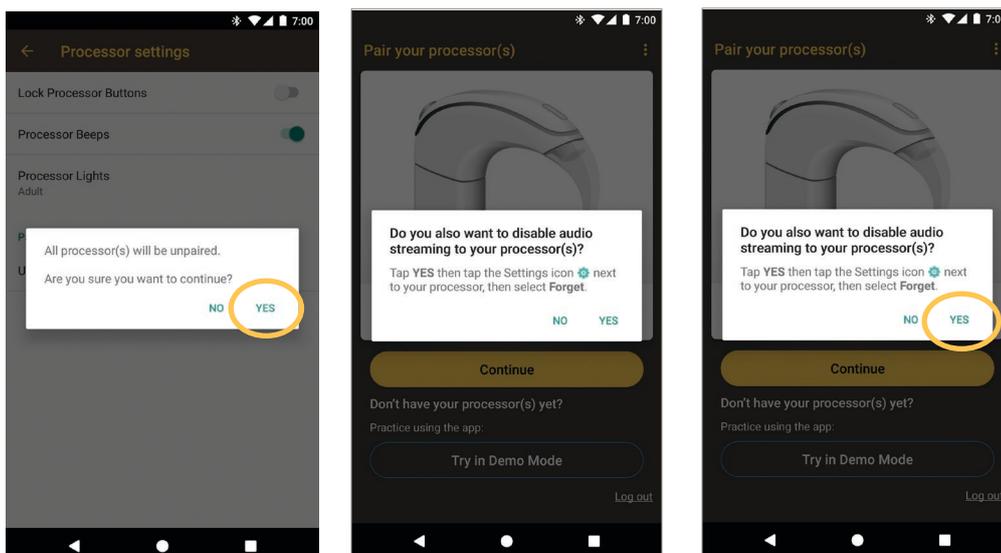

# 音声ストリーミング状態の確認

音声ストリーミング状態を確認するには：





- 1 アプリのメニューを開きます。
- 2 「設定 (Settings)」 をタップします。
- 3 「音声ストリーミング (Audio streaming)」 をタップします。
- 4 ストリーミングが「無効 (not active)」になっている場合は、画面の詳細情報を読み、提供されたリンクをタップします。

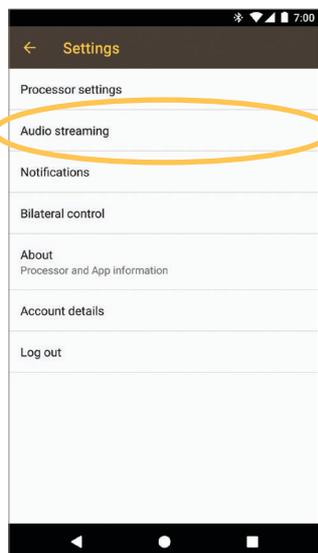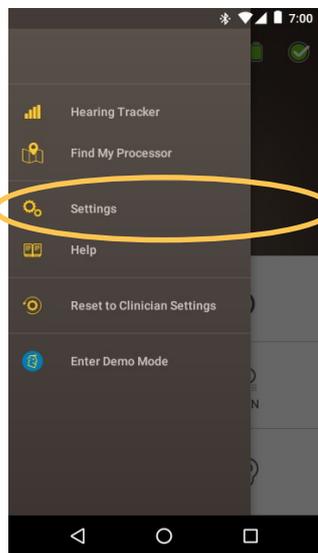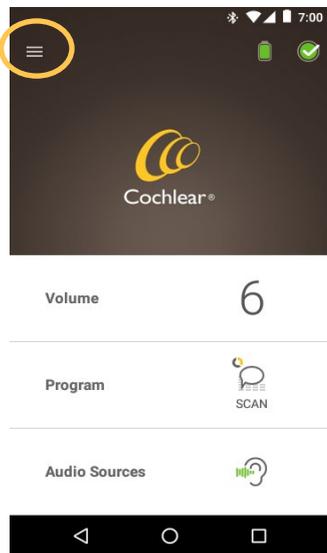

# 音声ストリーミングを無効にする

音声ストリーミングを無効にするには：

- 1 アプリのメニューを開きます。
- 2 「設定 (Settings)」 をタップします。
- 3 「音声ストリーミング (Audio streaming)」 をタップします。
- 4 ストリーミングが「有効 (enabled)」になっている場合は、指示に従って音声ストリーミングを無効にします。

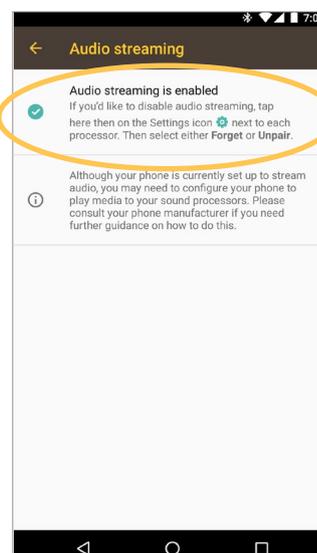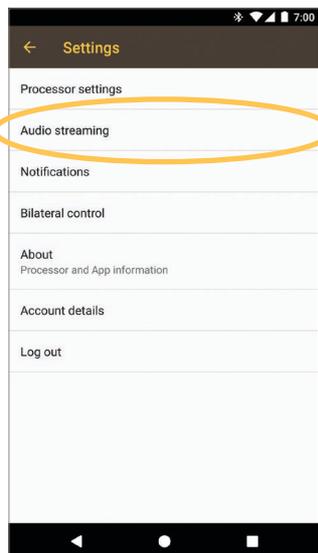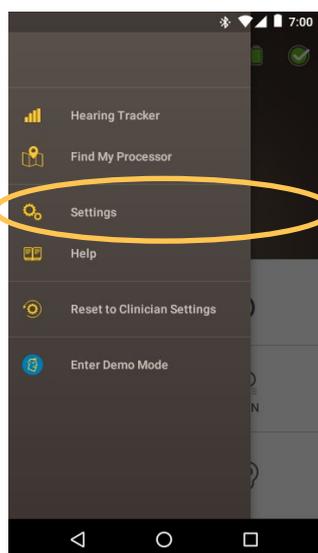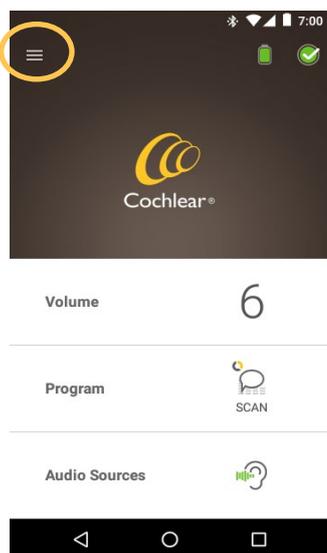

- アプリの詳細については、『Nucleus Smart アプリ取扱説明書』を参照してください。
- サウンドプロセッサの詳細については、『サウンドプロセッサ取扱説明書』を参照してください。
- ヒント、使い方の動画、その他の情報については、コクレア社のウェブサイトをご覧ください。  
[www.cochlear.com/](http://www.cochlear.com/)

販売名: Nucleus 8 サウンドプロセッサ 承認番号: 30500BZX00187000  
販売名: Kanso 2 サウンドプロセッサ 承認番号: 30300BZX00273000  
販売名: Nucleus 7 サウンドプロセッサ 承認番号: 23000BZX00310000

**[AU]** Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**[EC/REP] [DE]** Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Mailänder Straße 4 a, 30539 Hannover, Germany Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**[CH/REP] [CH]** Cochlear AG Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: +41 61 205 8204 Fax: +41 61 205 8205

**[US]** Cochlear Americas 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA Tel: +1 303 790 9010

**[GB]** Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

Cochlear, Hear now. And always. Kanso、Nucleus および楕円形のロゴはコクレアグループ各社の商標または登録商標です。Android は、Google Inc. の商標です。

Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標です。

P1939453 D1939557-V2

© Cochlear Limited 2023

Japanese translation of D2048583-V3 2023-08