

Cochlear™

معالج الصوت Nucleus® CP810

الدليل الرجعي السريع

معالج الصوت الخاص بك




كيف تقوم ب... . . .

استبدال بطاريات زنك الهواء

١



٢

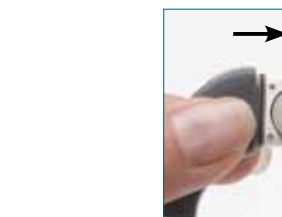

كيف تقوم ب... . . .

فصل وحدة البطارية

١



٢



كيف تقوم ب... . . .

تشغيل وإغلاق المعالج الخاص بك

إيقاف



تشغيل وإغلاق



كيف تقوم ب... . . .

تغيير البرامج

اضغط بسرعة



اضغط بسرعة



كيف تقوم ب... . . .

ضبط مستوى الصوت أو الحساسية

خيار بسيط




اضغط بسرعة



كيف تقوم ب... . . .

الانتقال من وإلى دخل ملف الهاتف

اضغط بسرعة

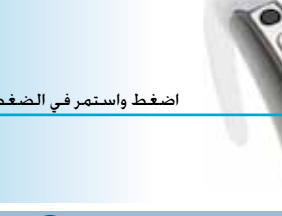

اضغط بسرعة



كيف تقوم ب... . . .

الانتقال من وإلى دخل الملحق السمعي*

اضغط بسرعة



اضغط بسرعة



فهم أضواء المؤشر

الضوء

أنت تقوم بتشغيل المعالج الخاص بك أو أنت تقوم بتغيير البرامج.

يساوي عدد الومضات رقم البرنامج الذي تم اختياره. على سبيل المثال، إذا ما رأيت ثلاث ومضات، فأنت تستخدم البرنامج الثالث.

أنت تقوم بتغيير مستوى الصوت أو الحساسية. (الخيار المتقدم فقط).

أنت تقوم بالانتقال من الملحق السمعي أو الملحق السمعي.

تقوم بالانتقال من ملف الهاتف أو الملحق السمعي إلى الملحق السمعي.

تقوم بالانتقال من ملف الهاتف أو الملحق السمعي إلى الملحق السمعي.

في حال كنت تضغط على الزر السفلي، فأنت تغلق المعالج الخاص بك أو قد يكون هناك عطل في المعالج الخاص بك. اتصل بالاختصاصي الخاص بك.

الميكروفونات تلتقط الصوت.

لمزيد من المعلومات عن المعالج الخاص بك، راجع دليل مستخدم معالج الصوت CP810.

فهم أضواء المؤشر

الضوء

أنت تقوم بإغلاق أزرار المعالج الخاص بك.

أنت تقوم بفتح أزرار المعالج الخاص بك.

قد يكون الملف غير مثبت في مكانه أو أن المعالج الخاص بك غير موصل بالقرصنة الصحيحة.

أزرار المعالج الخاص بك مغلقة.

بطارية المعالج الخاص بك فارغة.

في حال كنت تضغط على الزر السفلي، فأنت تغلق المعالج الخاص بك أو قد يكون هناك عطل في المعالج الخاص بك. اتصل بالاختصاصي الخاص بك.

الميكروفونات تلتقط الصوت.

لمزيد من المعلومات عن المعالج الخاص بك، راجع دليل مستخدم معالج الصوت CP810.

فهم النغمات الخاصة

الضوء

أنت تقوم بتغيير مستوى الصوت أو الحساسية. (الخيار المتقدم فقط).

أنت تقوم بتغيير البرامج. يساوي عدد النغمات رقم البرنامج الذي تم اختياره. على سبيل المثال، إذا سمعت نغمتين، فقد قمت بالانتقال للبرنامج الثاني.

تقوم بالانتقال من الميكروفونات إلى ملف الهاتف أو الملحق السمعي أو

تقوم بالانتقال من ملف الهاتف أو الملحق السمعي إلى الميكروفونات.

أزرار المعالج الخاص بك مغلقة.

بطارية المعالج الخاص بك فارغة.

في حال كنت تضغط على الزر السفلي، فأنت تغلق المعالج الخاص بك أو قد يكون هناك عطل في المعالج الخاص بك. اتصل بالاختصاصي الخاص بك.

الميكروفونات تلتقط الصوت.

لمزيد من المعلومات عن المعالج الخاص بك، راجع دليل مستخدم معالج الصوت CP810.

فهم النغمات الخاصة

الضوء

أنت تقوم بتغيير مستوى الصوت أو الحساسية. (الخيار المتقدم فقط).

أنت تقوم بتغيير البرامج. يساوي عدد النغمات رقم البرنامج الذي تم اختياره. على سبيل المثال، إذا سمعت نغمتين، فقد قمت بالانتقال للبرنامج الثاني.

تقوم بالانتقال من الميكروفونات إلى ملف الهاتف أو الملحق السمعي أو

تقوم بالانتقال من ملف الهاتف أو الملحق السمعي إلى الميكروفونات.

أزرار المعالج الخاص بك مغلقة.

بطارية المعالج الخاص بك فارغة.

في حال كنت تضغط على الزر السفلي، فأنت تغلق المعالج الخاص بك أو قد يكون هناك عطل في المعالج الخاص بك. اتصل بالاختصاصي الخاص بك.


الميكروفونات تلتقط الصوت.

لمزيد من المعلومات عن المعالج الخاص بك، راجع دليل مستخدم معالج الصوت CP810.


ملاحظات

الانتقال من وإلى دخل ملف الهاتف

اضغط بسرعة

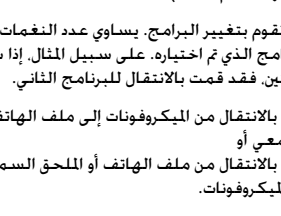


اضغط بسرعة

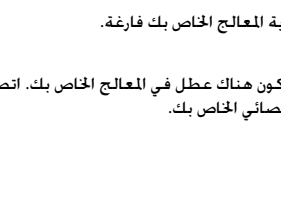


ملاحظات

الانتقال من وإلى دخل الملحق السمعي*

اضغط بسرعة

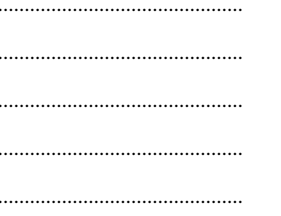

اضغط بسرعة

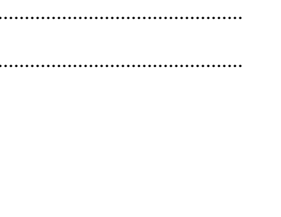

ملاحظات

الانتقال من وإلى دخل الملحق السمعي*

اضغط بسرعة



اضغط بسرعة



