

Csacsogás

Hangutánzó hangok, szavak és mondatok

A hangutánzó szavak olyan hangok, amelyek a hétköznapi életünkben ismerős dolgokhoz kapcsolódnak.

Hangutánzó szavak – játékok és tárgyak

Hang	Játék	Hang	Játék
vrrr	repülő	si-hu-hu	vonat
pukk	buborék pukkadása	bu-bu	busz
tü tü	autó	brrr	teherautó
loccs	hajó	tikk-takk	óra
aú/jajj	elesik, megvág	nínó, nínó	mentő
hu hu	majom	ha-ha-ha	bohóc/nevet
rajt!	fut	ho-ho-hó	Mikulás
juhú!	cowboy	vííí	csúszda
oá oá oá	baba	szia!	tükör
miaú	cica	vau-vau	kutya
mú	tehén	nyihaha	ló
be-e-e	birka	röff	malac
háp	kacsa	hú hú	bagoly
brekeke	béka	csip-csirip	madár
kot-kot	tyúk	kár-kár	varjú
körbe-körbe	malom/kerék	nyami	étel
ás-ás-ás	játéklapát	sz	kígyó
phűű	alvós játék	grrr	medve
csicsíja	baba ringatása	fel fel fel	felállós játék

Az alábbi könyv alapján adaptálva: Estabrooks, W. (1998) cochlear Implants for Kids, © 1998 Warren Estabrooks and The Alexander Graham Bell Association of the Deaf, Inc. Újranyomtatva engedéllyel.

Ne feledje...

- A mikrofonhoz közel és dallamos hanghordozással beszéljen.
- Mondja ki a hangutánzó szavakat a játék nevével együtt, pl. megy a vonat, si-hu-hu; forog a kerék körbe-körbe.
- Úgy vezessen be egy szót, hogy először meghallgattatja a gyermekkel: mondja ki többször, mielőtt megmutatná a játékot vagy tárgyat.
- Miután a gyermek meglátta a játékot, ismételgesse a hangot, amíg ő játszik vele.
- Várjon egy kicsit, időt hagyva gyermekének az utánzásra. Kiváló módszer a gyermek bátorítására, hogy használja a hangját, ha bevon a játékba egy másik felnőttet vagy egy idősebb gyermeket, Ön kimondja a szót, és csak akkor mozdítja meg a tárgyat, amikor a másik felnőtt vagy idősebb gyermek használja a beszédhangját. Majd ismételje meg ugyanezt a gyermekével is.
- Az első időszakban használjon egymástól nagyon eltérő hosszúságú hangutánzó szavakat, pl. a tehén bőgése legyen múúúúú múúúúú, a kacsa hápogása háp-háp. Gyermek sok-sok ismétlést követően, fokozatosan összeköti a hangokat a játékokkal.
- Próbáljon meg vele olyan beszélgetéseket és játékokat folytatni, amelyekben szerepelnek a hangutánzó szavak. Ragadjon meg minden lehetőséget arra, hogy gyermeke használhassa ezeket a hangokat. Használjon képeket, könyveket, játékokat, állatokat és valódi tárgyakat, hogy megerősítse a hangokat és a hozzájuk tartozó nyelvezetet.

nyikk-nyekk, nyikorog az ajtó; bimm-bamm, szól a harang; pápá, köszönj el a nagymamától. A hétköznapi, egyszerű szavak és kifejezések azonosítása és megértése fontos lépés a nyelvi fejlődésben.

D2340627-V1 2025-05 Hungarian Translation of D2083235-V1 2023-04