



Cochlear[®]

Hear now. And always

Procesador de sonido Cochlear[™] Nucleus[®] Kanso[®] 3

Referencia rápida

Acerca de


La *Guía de usuario del procesador de sonido Cochlear™ Nucleus® Kanso® 3* es su principal fuente de información acerca de su procesador de sonido. Incluye información sobre la finalidad prevista, las indicaciones, las advertencias y la resolución de problemas de su procesador de sonido.

Utilice esta referencia rápida después de haber leído la Guía de usuario para recordar algunas de las tareas comunes de los procesadores de sonido Kanso 3:

- Procesador de sonido Cochlear™ Nucleus® Kanso® 3 Nexa™ (modelo: CP1175)
- Procesador de sonido Cochlear™ Nucleus® Kanso® 3 (modelo: CP1170).


Procesadores de sonido Kanso 3

Parte delantera

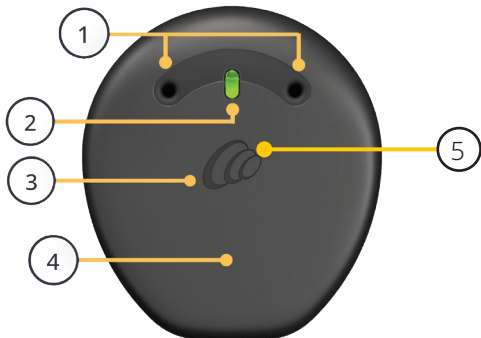

1. Entradas de micrófono
2. Indicador de iluminación LED
3. Logotipo de Cochlear
4. Tapa del micrófono
5. Interfaz de pulsación

Parte trasera

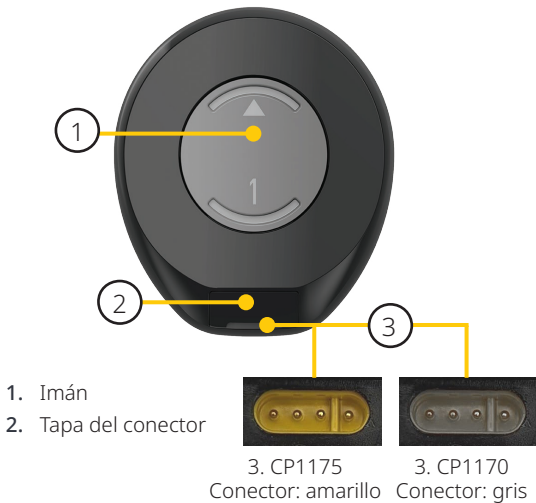

Opciones de control

1. **Dar toques** en el procesador de sonido.
2. Utilizar la **aplicación Nucleus Smart** en un dispositivo Apple o Android compatible.
3. Utilizar un **mando a distancia básico** CR310 de Cochlear.

Función	Toques	Aplicación Nucleus Smart	Mando a distancia básico
Encender/apagar	X		
Programa		X	X
Volumen Sensibilidad		X	X
Fuentes de audio/ Dispositivos inalámbricos		X	X
Límite de volumen general Graves y agudos		X	
ForwardFocus		X	

Carga del procesador de sonido

Para recargar la pila interna del procesador de sonido:

1. Coloque el procesador de sonido en el **cargador principal Cochlear™**.

El cargador principal es una base de carga específica con la capacidad de secar el procesador de sonido.



o bien

2. Conecte el procesador de sonido al **cargador portátil Cochlear™**.

El cargador portátil recarga el procesador de sonido mientras usted puede seguir utilizándolo.



Toques

Puede **tocar** el procesador de sonido para **encenderlo** y **apagarlo**.

Cómo tocar

- Dé golpecitos en el **logotipo de Cochlear**.
- Dé **toques rápidos y firmes**. No presione.



Consejo: El procesador de sonido se puede tocar tanto si está en el implante como si no.

Control	Número de toques
Encender	Doble toque (2 toques)
Apagar	Triple toque (3 toques)

Encender y apagar

Encender

- **Encendido automático**
Colóquese el procesador de sonido en la cabeza
o bien
- **Doble toque**
Dos toques rápidos y firmes



Mientras el procesador de sonido se **enciende**, la luz **parpadea en verde**.

Apagar

- **Apagado automático**
Quítese el procesador de sonido de la cabeza y espere dos minutos (si el especialista clínico ha activado la función)
o bien
- **Triple toque**
Tres toques rápidos y firmes



Cuando el procesador de sonido **se apaga** la luz cambia a **naranja fija**.

Cambiar de programa

Puede elegir entre varios programas para cambiar la forma en que su procesador de sonido gestiona el sonido.

Para cambiar de un **programa** a otro, utilice la aplicación **Nucleus Smart** o el **mando a distancia básico**.



Nota: Primero hay que enlazar el procesador de sonido con la aplicación Nucleus Smart o el mando a distancia básico. Consulte las guías de usuario correspondientes para obtener más información.

Mientras el programa cambia, la luz **parpadea en verde**.

Indicadores luminosos



Parpadeos en verde

Qué significa

Parpadeos en verde al cambiar el programa.

El número de parpadeos indica el número del programa actual (1, 2, 3, 4...).

Transmitir audios

El procesador de sonido puede transmitir sonido de fuentes de audio externas.

Dispositivos inalámbricos

Los dispositivos Cochlear True Wireless™ pueden transmitir sonido al procesador de sonido de forma inalámbrica:

- **Cochlear™ Wireless TV Streamer** se controla desde la **aplicación Nucleus Smart** o el mando a distancia básico Cochlear™.
- Los controles **Cochlear™ Wireless Phone Clip** se pueden utilizar para realizar llamadas telefónicas con manos libres.
- **Cochlear™ Wireless Mini Mic 2+** presenta más opciones de conectividad, como una **telebobina** integrada que proporciona audios procedentes de un sistema de bucle de inducción.

Para cambiar de una **fuentes de audio** a otra, utilice la **aplicación Nucleus Smart** o el **mando a distancia básico**.

Mientras la fuente de audio cambia, la luz **parpadea en azul**.

Llevar el procesador de sonido

Coloque el procesador de sonido en el implante del siguiente modo:

- el logotipo de Cochlear, la luz y las entradas de micrófono orientados hacia arriba,
- el borde plano inferior del procesador de sonido hacia abajo.



Precaución: Asegúrese de colocar correctamente el procesador de sonido para obtener el mejor rendimiento y para que no se desprenda del implante.



En la imagen se muestra la colocación y la orientación correctas del procesador de sonido en el implante.



Precaución

Si tiene dos implantes, debe utilizar el procesador de sonido correspondiente a cada implante.

Cambiar el imán

Para **retirar** el imán del procesador de sonido:

1. **Inserte** las tiras en relieve de la herramienta de imán en las ranuras del imán.
2. **Gire** la herramienta en el **sentido contrario a las agujas del reloj** y **extraiga** el imán.



Para **insertar** un imán en el procesador de sonido:

1. **Inserte** las tiras en relieve de la herramienta de imán en las ranuras del imán.
2. **Inserte** el imán en el procesador de sonido.



3. **Gire** la herramienta en el **sentido de las agujas del reloj** hasta que el imán **haga clic** al encajar.
4. **Retire** la herramienta.




Colocar una almohadilla SoftWear

La almohadilla Cochlear SoftWear™ una almohadilla de contacto de espuma opcional. Si experimenta molestias, coloque esta almohadilla adhesiva en la parte posterior del procesador de sonido.


1. **Retire la** tira adhesiva.



2. **Pegue** la almohadilla SoftWear en la parte posterior del procesador de sonido.

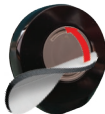

3. **Retire** los dos lados acolchados.

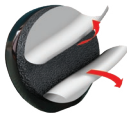


4. **Coloque** el procesador en el implante.

Enganchar un hilo de seguridad

Para que haya menos posibilidades de perder el procesador de sonido, puede enganchar un hilo de seguridad Cochlear a su ropa o una pinza para el pelo Cochlear.

- **El hilo de seguridad Cochlear™ (corto)** se engancha a la ropa con una pinza con cierre a presión y se conecta al conector de 4 clavijas.
- **El hilo de seguridad Cochlear™ (largo)** se engancha a la ropa con una pinza con cierre a presión y se conecta al conector de 4 clavijas.
- **Hilo de seguridad Cochlear™ (bucle corto)**. Se utiliza con la pinza para el pelo Cochlear y se conecta al conector de 4 clavijas.
- **Hilo de seguridad Cochlear™ (bucle doble corto)**. Se utiliza con la pinza para el pelo Cochlear a través del accesorio Kanso® Halo o los anillos del accesorio Halo.
- **Hilo de seguridad Nucleus®** Se engancha a la ropa con una pinza con cierre a presión y bucles en un accesorio Halo o Cochlear™ Nucleus® Kanso® Aqua+.

Hilo de seguridad

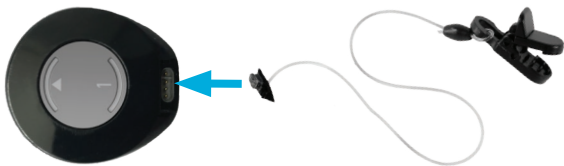

Conexión del hilo de seguridad
al conector de 4 clavijas



Advertencia: Se advierte a los padres y cuidadores de que el uso sin supervisión de cables largos (p. ej., hilos de seguridad) puede constituir un riesgo de estrangulamiento.

Utilizar el accesorio Halo

El accesorio Kanso® Halo mejora la seguridad frente a las caídas del procesador de sonido. Hay dos opciones para utilizarlo:

1. Utilice los **anillos** como puntos de anclaje para enganchar a los ojales.







o bien

2. Utilice **hilos de seguridad Cochlear (bucle doble corto)** como puntos de anclaje para enganchar a los ojales.






Luces


Uso cotidiano

Luz	Qué significa
	El procesador de sonido parpadea cuando recibe sonido de los micrófonos (solo modo infantil).
	Encendiendo el procesador de sonido. El número de parpadeos indica el número del programa actual.
	El procesador de sonido parpadea mientras recibe sonido desde la fuente de audio (solo modo infantil).
	El procesador de sonido se está apagando.

Alarmas


Luz	Qué significa
	El procesador de sonido parpadea cuando está apagado (o conectado al implante erróneo).
	La pila del procesador de sonido está gastada. Cambie la pila.
	Fallo. Póngase en contacto con su especialista clínico. Permanece encendida hasta que se solucione el fallo.

Hear now. And always

 **AU Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555

 **EC REP DE Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Mailänder Straße 4 a, 30539 Hannover, Germany Tel: +49 511 542 770

 **CH REP CH Cochlear AG** Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204

 **US Cochlear Americas** 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA
Tel: +1 (800) 523 5798

 **GB Cochlear Europe Ltd** 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: +44 1932 26 3400

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Kanso, Nexa, Nucleus y el logotipo elíptico son marcas comerciales o marcas registradas de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2023

D2135580-V1

Spanish translation of D2045095-V1 2023-12

Cochlear® 