

Diez sonidos para desarrollar las habilidades auditivas de su hijo

Los 10 sonidos de Ling son sonidos del habla especiales que ayudan a desarrollar la audición de su hijo en todas las diferentes frecuencias y tonos que necesitan para un desarrollo claro del habla y el lenguaje, desde sonidos graves hasta sonidos de alta frecuencia.



mmm

Mmm... ¡el helado está mmmuy rico!



ahh

¡Ahh! ¡Un avión!



uuu

La lechuza hace "uuuh-uuuh"



j-j-j

Un perro jadea "j-j-j"



shh

Shh... el koala está durmiendo



sss

La serpiente hace "sss"



zzz

La abeja hace "zzz"



nnn

El payaso tiene una nnnariz grannnde



iii

¡iii! ¡Un ratón!



ch-ch-ch

La rana ch-ch-chapotea*

* El sonido de la letra J en inglés no existe en la mayoría de los dialectos del español. Si tu hijo(a) es bilingüe o está aprendiendo inglés, también puede practicar con el sonido j-j-j en inglés, diciendo "la rana j-j-jumped."

Al practicar con los 10 sonidos de Ling, se refuerza:

- ✓ **El reconocimiento de los sonidos**
La práctica habitual entrena el cerebro para reconocer diferentes sonidos, lo cual es un elemento fundamental para la comprensión del habla.
- ✓ **La claridad del habla**
Ayudar a su hijo a desarrollar habilidades de escucha sólidas es fundamental para su crecimiento hacia un habla clara e inteligible.
- ✓ **La relación con los padres**
Asuma un papel activo en el desarrollo auditivo de su hijo mediante interacciones de escucha positivas y constantes.
- ✓ **El monitoreo del dispositivo**
Si su hijo constantemente omite un sonido, comuníquese a su audiólogo o terapeuta.

Cómo utilizar los 10 sonidos de Ling con su hijo

La práctica de los sonidos de Ling desarrolla las habilidades de escucha de manera estructurada y divertida. La exposición diaria ayuda a fortalecer el procesamiento de los sonidos, acelera el aprendizaje de su hijo para escuchar y hablar, y le proporciona información valiosa sobre el desarrollo auditivo de su hijo. Pruebe estos ejercicios en orden, avanzando a medida que mejoren las habilidades de su hijo.

1. Detección: “¿Lo oíste?”

Diga un sonido de Ling a un volumen de conversación normal mientras su hijo no le mira la cara y observe su reacción. Un niño pequeño demuestra que oyó el sonido cuando lo mira, detiene su actividad o reacciona de alguna manera. A un niño mayor se le puede enseñar a levantar una mano, aplaudir o seleccionar la tarjeta o el juguete que coincide con el sonido.

2. Diferenciación: “¿Puedes oír la diferencia?”

Sostenga tarjetas o juguetes que representen dos sonidos contrastantes. Diga uno de los sonidos y pídale a su hijo que elija el elemento correspondiente.

3. Identificación: “¿Qué sonido oíste?”

Sostenga tarjetas o juguetes que representen todos los sonidos. Pídale a su hijo que elija el elemento correspondiente.

4. Imitación: “¿Puedes decirlo tú también?”

Pídale a su hijo que repita el sonido que usted produzca. Esto le ayuda a usted a evaluar si oye el sonido con suficiente claridad para producirlo.

5. Añada distancia y ruido de fondo: “¿Aún puedes oírme?”

Una vez que la identificación sea clara en un entorno silencioso, intente lo siguiente:

- Produzca los sonidos desde el lado opuesto de la sala, manteniendo la voz en un volumen de conversación normal.
- Añada ruido de fondo suave (ventilador, música tranquila).

Consejos para el éxito

- ✓ Utilice su voz normal de conversación.
- ✓ Para evitar la lectura de labios, siéntense al lado de su hijo, mirando en la misma dirección. Intente no cubrirse la boca, ya que esto puede impedir la propagación de las palabras.
- ✓ Que sea breve: 1 o 2 minutos al día es suficiente.
- ✓ Hágalo divertido. El juego de las escondidas, los juguetes o las caras graciosas mantienen a los niños entretenidos.
- ✓ Celebre el esfuerzo. Elogie los comportamientos de escucha, no solo las respuestas correctas.
- ✓ Conviértalo en un hábito. La práctica frecuente favorece el éxito a largo plazo.



mmm



ahh



uuu



j-j-j



shh



sss




zzz



ch-ch-ch



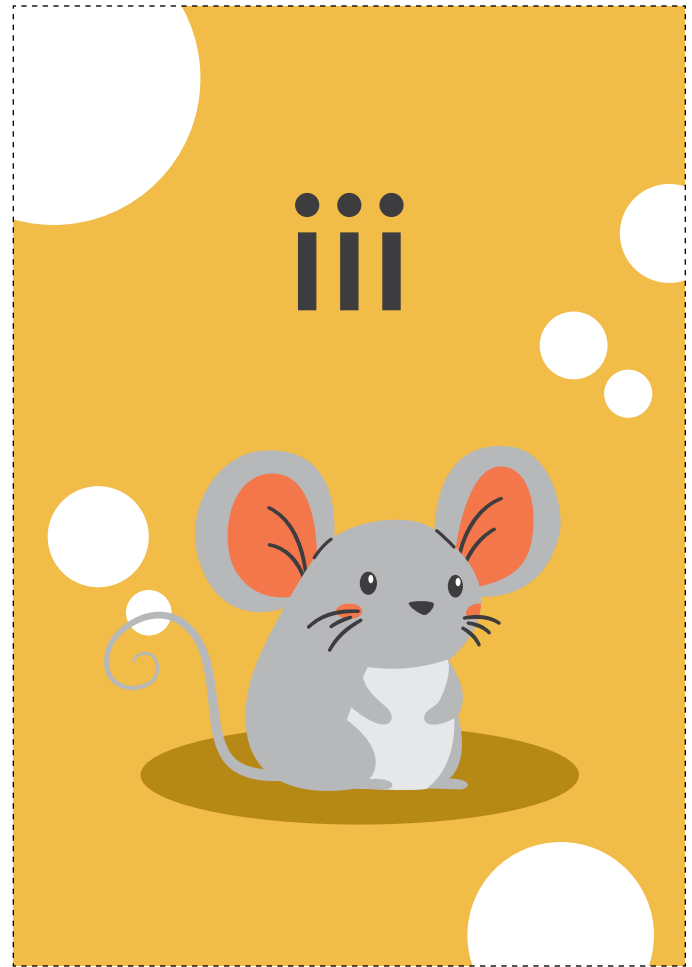

Consulte a su profesional médico sobre los tratamientos para la pérdida auditiva. Los resultados pueden variar, y su profesional de la salud le informará sobre los factores que podrían afectar sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local de Cochlear para obtener información sobre los productos.

©Cochlear Limited 2026. Todos los derechos reservados. ACE, Advance OffStylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, Nexa, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SoundBand, True Wireless, el logotipo elíptico, Vistafix, Whisper, WindShield y Xidium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del grupo de empresas Cochlear.

Cochlear North America

10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, EE. UU.
Teléfono: +1 800 523 5798 Soporte: +1 800 483 3123

Cochlear Canada Inc.

2500-120 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canadá
Teléfono: +1 800 483 3123 Fax: +1 416 972 5083

www.cochlear.com