




Kit RMN Cochlear™

Informații esențiale cu privire la utilizare

Hear now. And always

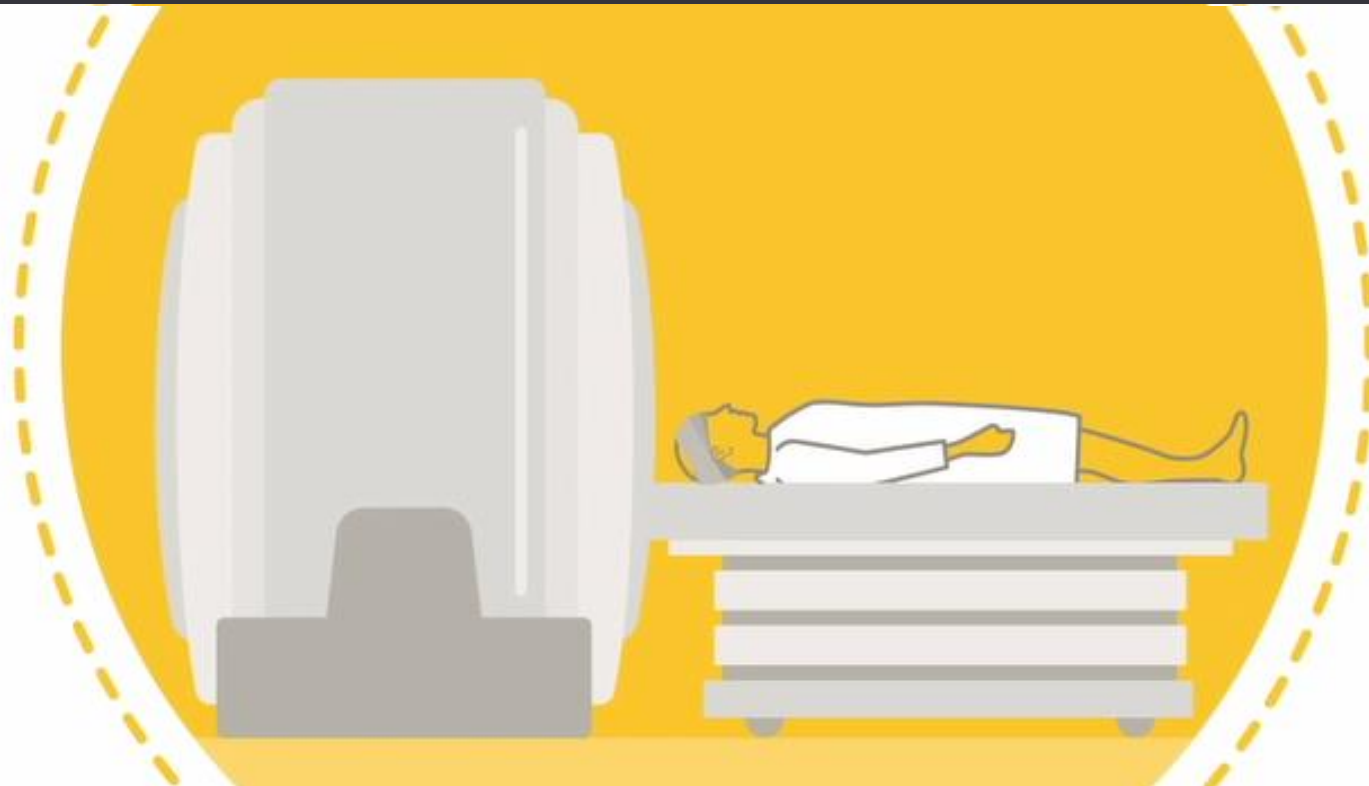

Kit RMN Cochlear™



Scopul utilizării

Kitul RMN Cochlear™ este destinat utilizării de către pacienți cu implant Cochlear Nucleus pentru a preveni dislocarea magnetului implantului în timpul scanărilor RMN de 1,5 T, conform descrierii din ghidul RMN.

Kitul RMN este de unică folosință.

Kitul RMN este destinat utilizării cu următoarele implanturi Cochlear Nucleus, atât în cazul pacienților cu implanturi unilaterale, cât și al celor cu implanturi bilaterale:

- **Seria CI500** CI512, CI522, CI532 și ABI541
- **Seria CI24RE** CI422, CI24REH (Hybrid L24), CI24RE (CA), CI24RE (CS) și CI24RE (ST)
- **Seria CI24R** CI24R (CA), CI24R (CS), CI24R (ST)
- **Seria CI24M** CI24M, CI11+11+2M și ABI24M
- **Seria CI22** CI22M (cu magnet detașabil)



Conținutul kitului RMN

**Kitul RMN
conține:**




**IDU în cutie
(EN)**

Ghidul de utilizare include instrucțiuni de utilizare (IDU) privind aplicarea kitului RMN.

Pentru informații și parametri cu privire la implantul cochlear în timpul procedurii RMN, consultați ghidul RMN.

**2 bucăți
Atele
magnetice***

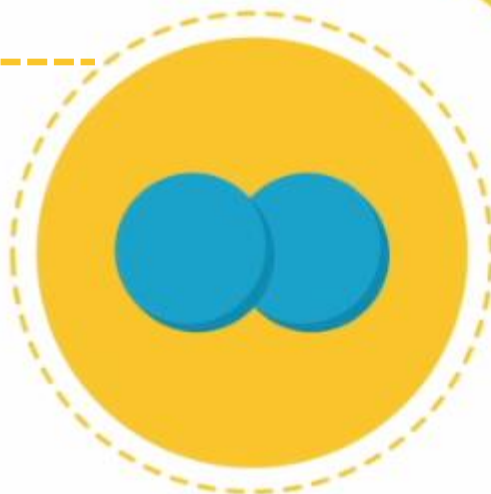

**Bandaj de
compresie**



* Cantitatea se ia în considerare și în funcție de pacienții cu implanturi bilaterale. Se utilizează doar 1 atelă magnetică pentru fiecare implant

Aplicare

Înainte de intrarea în sala de RMN

Înainte de intrarea în sala de RMN



Identificați tipul de implant

- Fiecare implant are caracteristici și detalii specifice care vă pot ajuta în identificarea implantului. Consultați ghidul RMN pentru identificarea implantului.



Seria CI600
(Kitul RMN nu este destinat
pentru utilizarea cu seria
CI600)*



Seria CI500



Seria CI24RE

Magnet

Corpul implantului

Ansamblu electronic

*Seria CI600 este compatibilă cu RMN până la 3 T fără să fie necesară îndepărtarea magnetului sau aplicarea unei atele.

Îndepărtați procesorul de sunet de pe capul pacientului



Țineți cont de faptul că pacientul nu va mai putea auzi după îndepărtarea procesorului de sunet.

Înainte de a îndepărta procesorul de sunet, asigurați-vă că pacientul înțelege procedura.

Pasul 1. Localizați magnetul implantului



Locația magnetului implantului

- Dacă pacientul utilizează un procesor de sunet retroauricular, locația antenei externe este aceasta.
- Dacă pacientul utilizează un procesor de sunet în afara urechii, locația procesorului de sunet este aceasta.



Procesor de
sunet în afara
urechii



Procesor de sunet
retroauricular

Antenă
externă

Pasul 2. Poziționați atelele magnetice



Atelele magnetice

- Plasați atela magnetică deasupra magnetului implantului. Pe măsură ce deplasați atela către magnetul implantului, veți simți atracția magnetică.




Atela magnetică trebuie să rămână în poziție fără să fie nevoie să o țineți



Pentru o retenție mai bună, dați la o parte părul cât mai mult posibil



Pasul 2. Poziționați atelele magnetice

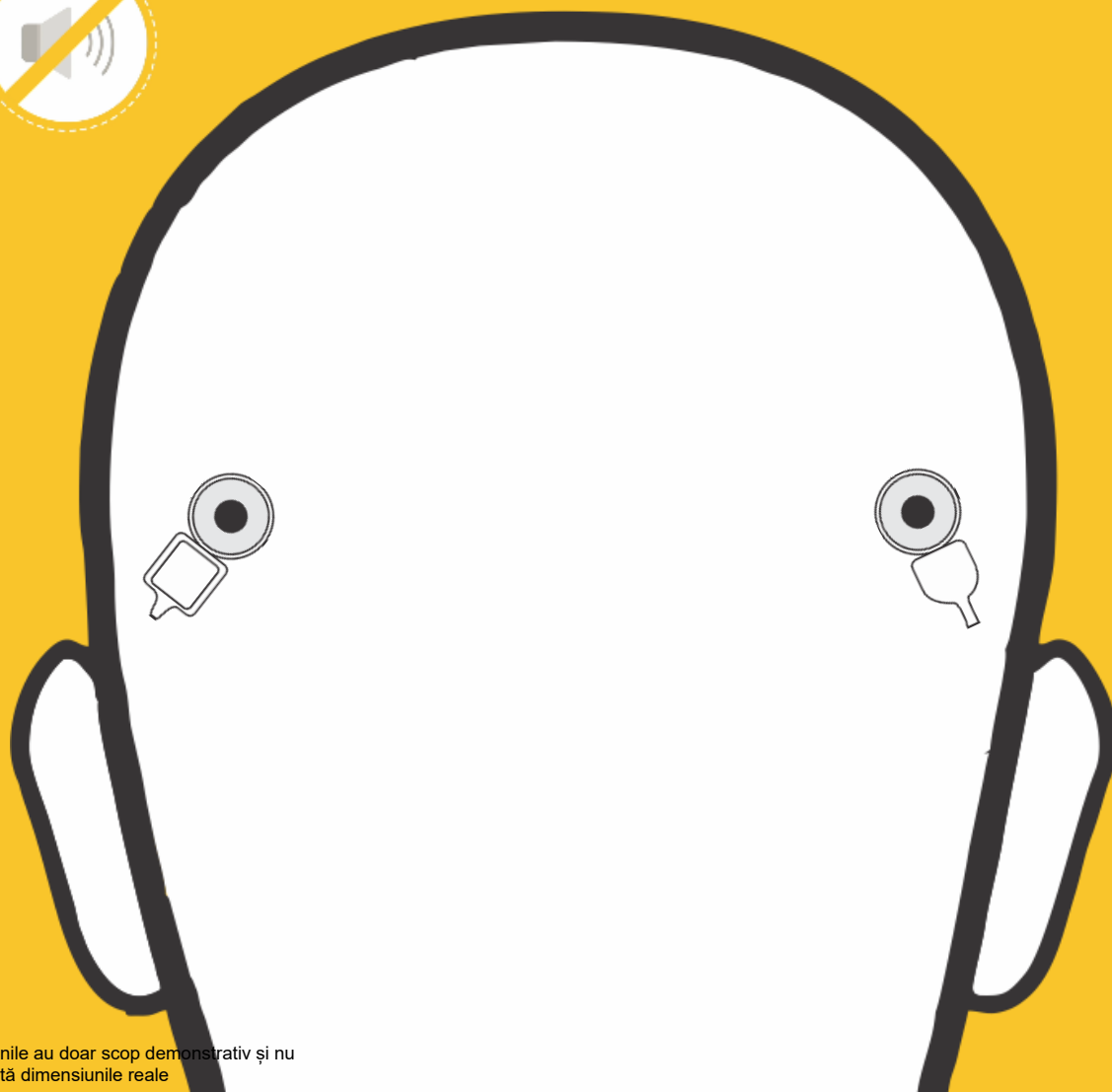

Pacienți cu implanturi bilaterale

- Dacă pacientul are două implanturi cohleare, urmați instrucțiunile din ghidul RMN separat pentru fiecare model de implant.
- Aplicați o atelă magnetică pe oricare dintre implanturile pentru care este indicat kitul RMN. Acest lucru poate însemna că trebuie aplicate atele pe ambele locuri ale magnetului implantului, numai pe un loc al magnetului implantului sau pe niciun loc al magnetului implantului, în funcție de modele.

Exemplul unui caz în care pacientul are două implanturi diferite:

RMN de 1,5 T la un pacient cu implanturi bilaterale seria CI24RE și Profile Plus*

- Este **obligatorie** utilizarea unei atele magnetice cu implantul CI24RE.
- Caseta cu magnet Profile Plus poate să rămână în poziție în timpul efectuării RMN-ului, fără a fi necesară utilizarea unei atele magnetice.
- Bandajul (pasul următor) poate acoperi ambele locuri ale magnetului implantului.

Pasul 3. Aplicați bandajul de compresie



Bandajul de compresie

- Prima înfășurare trebuie să înceapă din partea din spate a craniului și trebuie să fie situată cât mai jos posibil pe frunte, fără a acoperi ochii.
- Continuați bandajarea de jur împrejurul capului, asigurându-vă că, la fiecare înfășurare, atela este acoperită complet și nu se mișcă din poziția sa de deasupra magnetului implantului.



Bandajul este autoaderent

Nu înfășurați mai sus de frunte

Pasul 3. Aplicați bandajul de compresie



Bandajul de compresie

- Asigurați-vă de faptul că atela este **acoperită complet** și nu se mișcă din poziția sa de deasupra magnetului implantului.
- **Rețineți** faptul că bandajul este autoaderent.

AVERTISMENT

Nu efectuați scanarea RMN dacă atela/atelele nu rămâne/rămân în poziție. Alinierea necorespunzătoare dintre atelă și magnetul implantului poate conduce la dislocarea magnetului implantului și poate cauza dureri sau poate avea ca rezultat necesitatea explantării.

Pasul 3. Aplicați bandajul de compresie



Bandajul de compresie

- Continuați bandajarea până când a fost utilizat tot bandajul.
- **Nu tăiați bandajul.**
- Bandajul trebuie să fie înfășurat ferm astfel încât să asigure retenția atelei/atelelor în poziție, însă nu prea strâns încât să provoace durere.
- După ce ați finalizat bandajarea, apăsați atent cu mâinile în jurul întregului bandaj, pentru a vă asigura că acesta este bine fixat și că straturile bandajului s-au lipit unul de altul. Dacă este necesar, utilizați bandă.



Acum, pacientul este gata pentru RMN și poate intra în câmpul magnetic, implantul său fiind fixat în condiții de siguranță

După scanarea RMN



- Îndepărtați bandajul și atela.
- După ce pacientul iese din sala de RMN, rugați-l să plaseze procesorul de sunet pe cap și să îl pornească.

După ce procesorul de sunet a fost plasat la locul său, rugați pacientul să vă confirme că nu există disconfort și că percepe sunetele normal.

Vă rugăm să consultați ghidul RMN și ghidul de utilizare al kitului RMN Cochlear pentru informații suplimentare.



Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Consultați-vă cu specialistul dvs. în legătură cu tratamentele ce trebuie urmate în cazul pierderii auzului. Rezultatele pot varia, iar specialistul dvs. vă va sfătui în legătură cu factorii care v-ar putea afecta rezultatul. Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare. Există posibilitatea ca unele produse să nu fie disponibile în anumite țări. Contactați reprezentantul dvs. local Cochlear pentru informații despre produs.

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True Wireless, logo-ul de formă eliptică și Whisper sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, SoundArc, Vistafix și WindShield sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

© Cochlear Limited 2020. D1770251 VI 2020-07 Romanian Translation of D1767975 V1 2020-07